

ialusetcare® GEL APAISANT


Laboratoires
Genevrier
L'EXIGENCE DE VOTRE SANTÉ

Gel à base d'acide hyaluronique (sel de sodium) 0,2 %
USAGE CUTANÉ
tube de 50 g

PROPRIÉTÉS

ialusetcare® GEL APAISANT contient de l'acide hyaluronique (sel de sodium). L'acide hyaluronique est le composant principal de la peau. Grâce à son hydrophilie caractéristique, il est capable d'absorber de l'eau jusqu'à 1 000 fois son propre volume ; ainsi, il contribue à maintenir le bon niveau d'hydratation de la peau, en apaisant les symptômes dus aux irritations cutanées.

INDICATIONS

ialusetcare® GEL APAISANT est indiqué dans le traitement des irritations cutanées provoquées par des agents physiques, dont les brûlures et les érythèmes causés par l'exposition au soleil ainsi que les irritations et les rougeurs cutanées dues au froid et au vent.

ialusetcare® GEL APAISANT est également indiqué pour apaiser les rougeurs suite à un tatouage, une épilation ou des traitements esthétiques.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Tube de 50 g contenant du gel.

COMPOSITION

Acide hyaluronique (sel de sodium) 0,2 %, glycérine végétale, sorbitol, carbopol, hydroxyde de sodium, acide benzoïque, acide déhydroacétique, éthylhexylglycérine, 2-phénoxyéthanol, eau déminéralisée.

FRÉQUENCE D'UTILISATION

Appliquer 2 fois par jour, ou en fonction des besoins individuels, jusqu'à la disparition du symptôme.
Si le symptôme persiste, consulter un médecin ou un pharmacien.

CONSIGNES D'UTILISATION

Appliquer une fine couche de gel directement sur la zone à traiter, en massant délicatement jusqu'à absorption complète.

AVERTISSEMENTS

Ne pas utiliser ialusetcare® GEL APAISANT après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Ne pas utiliser ialusetcare® GEL APAISANT si l'emballage est ouvert ou endommagé.

Conserver le produit entre 0°C et 25°C. Ne pas congeler.

Une fois vide, jeter le tube conformément aux règles normales de tri des déchets.

TENIR HORS DE PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS

USAGE EXTERNE

INTERACTIONS

Il n'y a aucune interaction connue pour le moment quant à l'utilisation de ialusetcare® GEL APAISANT en combinaison avec d'éventuels traitements concomitants.

CONTRE-INDICATIONS

ialusetcare® GEL APAISANT ne peut être utilisé en cas d'hypersensibilité connue à l'acide hyaluronique (sel de sodium) ou à un ou plusieurs autres composants.

EFFETS SECONDAIRES

Aucun effet secondaire n'a été observé à ce jour suite à l'utilisation de ialusetcare® GEL APAISANT.

TOUTEFOIS, SI VOUS REMARQUEZ L'APPARITION D'UN EFFET SECONDAIRE, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

Année de certification CE : 2016

Date de la dernière révision de la notice : Novembre 2017



Fabricant :

IBSA Farmaceutici Italia srl
Via Martiri di Cefalonia, 2 – 26900 Lodi – ITALIE
E-mail : info@ibsa.it



Distribué par :

Laboratoires Genevrier
280 rue de Goa – ZI les 3 moulins – Parc de Sophia Antipolis
06901 Sophia Antipolis - France



Température de conservation



Voir les consignes d'utilisation



À utiliser avant le...



Lot

BIANCA

VOLTA